



Morgan@Lens Anleitung für die Augenspüllinsen
zum Spülen und zur Medikation der Horn- und Bindehaut und des Augapfels.

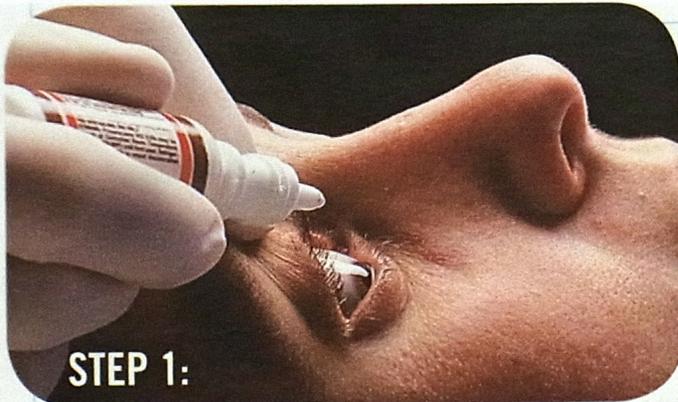


EINSETZEN:
Falls notwendig und verfügbar
Augenbetäubungsmittel einflößen.




Stecken Sie die Morgan@Linse
an den Schlauch der Spülflüssigkeit.
VENTIL ÖFFNEN.

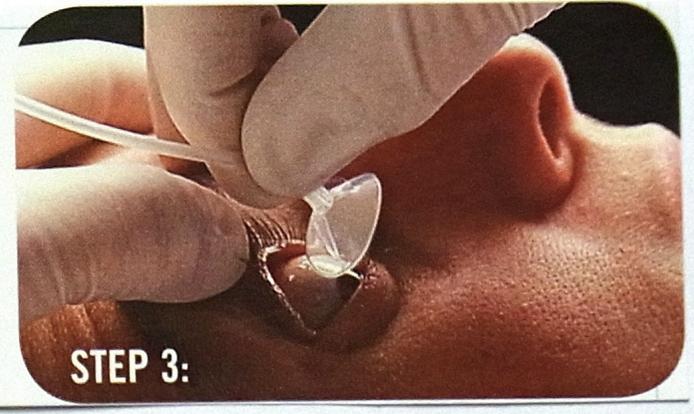


Patienten nach unten blicken lassen.
Morgan@Linse unter das obere Lid einsetzen.
Patienten nach oben blicken lassen.
Linse unter das untere Lid schieben.

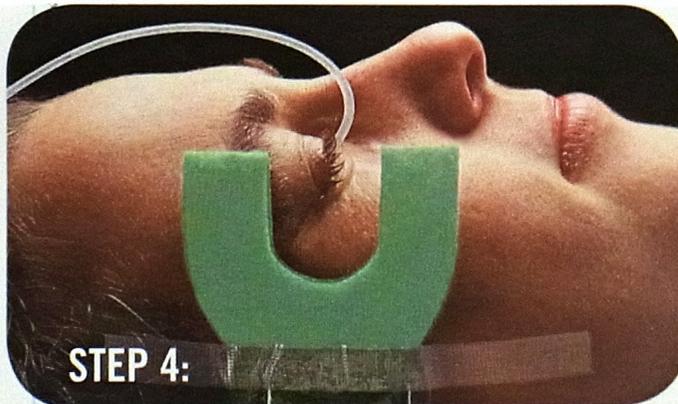

Wenn Auge geschlossen ist, Spülmenge einstellen.
Schlauch auf der Stirn befestigen. Austretende
Spülflüssigkeit auffangen. (Medi-Duct oder mit
anderem geeigneten Mittel.)
LINSE ENTFERNEN WENN KEINE SPÜLUNG!

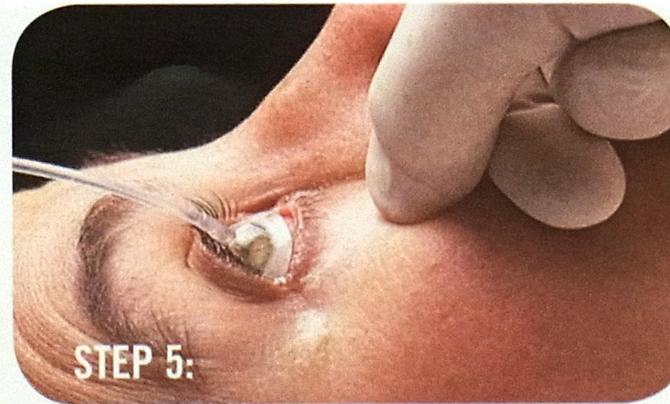

SPÜLLINSE ENTFERNEN:
BEI LAUFENDER SPÜLUNG!
Patient soll nach oben blicken, Linse
aus dem unteren Lid herausziehen.
Position halten.

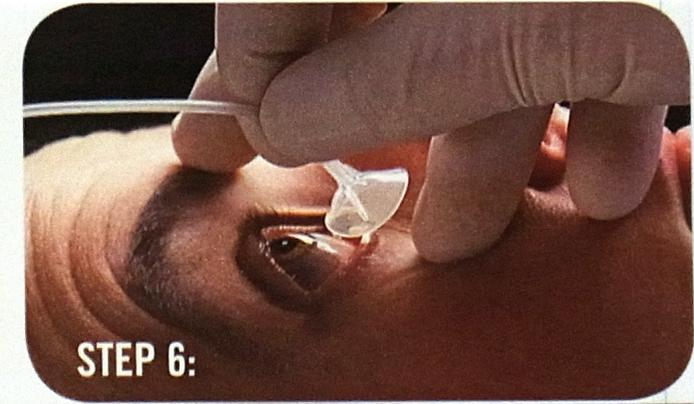

Morgan@Linse herausziehen.
SPÜLFLÜSSIGKEIT ABSTELLEN.