

ANWENDUNGSTABELLE FÜR Morgan®Lens AUGENSPÜLLINSEN

VERLETZUNG	LÖSUNG	VERFAHRENSWEISE	MENGE	HÄUFIGKEIT
Verletzungen durch Säuren, Lösungsmittel, Benzin, Waschmittel etc.	ausgewogene Salzlösung Ringer Lactat* o.ä.	500 ml Beutel	500 ml freier Durchfluß, Dann neu bewerten und mit reduzierter Rate fortsetzen.	Einmal. Wiederholen, falls notwendig.
Alkalische Verbrennungen (Laugen)	wie vor	1.000 ml Beutel	2.000 ml freier Durchfluß. Neu bewerten. Fortsetzen mit 50 ml pro Stunde oder 15 Tropfen/Minute.	Fortsetzen bis pH Wert der Augenhöhle auf neutral zurück ist.
Fremdkörper (nicht eingedrungen)	wie vor	500 ml Beutel	500 ml freier Durchfluß. Dann neu bewerten und mit reduzierter Rate fortsetzen.	Einmal. Wiederholen, falls notwendig
Gefühl eines Fremdkörpers ohne sichtbarem Fremdkörper	20 cm³ Sterile Lösung	20 cm³ Spritze	Langsam ohne Druck.	Einmal. Wiederholen falls notwendig.
Vor der Operation (Präoperative Routine)	10 cm³ Antiseptische Augen- Lösung	10 cm³ Spritze	Langsam ohne Druck	Einmal.
Operativer Eingriff am Augenlid	ausgewogene Salzlösung Ringer Laktat* o.ä.	250 ml Beutel	4 Tropfen / Minute	Während der gesamten Operation
Schwere Infektion	ausgewogene Salzlösung mit geeigneten Antibiotika und Steroiden. (wenn angezeigt) Ringer* Laktat o.ä.	500 ml Beutel	50 ml/Stunde oder 15 Tropfen/Minute	Durchgehend für 70 Stunden. Dann in 10 h Intervallen bis merkbare Verbesserung eintritt.

**The Morgan®Lens**

**CE0470**

Nur für einmaligen Gebrauch bestimmt.

Garantiert steril, wenn original verpackt.

Linse und Schlauch aus Silikon, Anschlußstück aus Polypropylen

Zertifiziert nach ISO 9001 und EN 13485

**Erhältlich bei:**

**DCW Spezialprodukte**

Lotti Kreisel

Ludwigsburger Str. 53/1

74080 Heilbronn

www.dcw-spezialprodukte.de